

Информационное письмо

ООО «Олимпас Москва», официальный представитель на территории России и СНГ компании Olympus Europa SE & CO. KG (Германия), являющейся представителем производителя оборудования Olympus Medical Systems Corporation (Япония) в Европейском регионе, настоящим письмом выражает Вам свое почтение и сообщаем следующее.

На основании произведенных испытаний на совместимость дезинфицирующих средств с эндоскопическим оборудованием (гибкими эндоскопами) производства Olympus Medical Systems Corporation (Япония), а также возможность использования этих средств в репроцессорах OER-A/OER-AW, компанией рекомендуются к использованию следующие средства:

Для ручной обработки

| Торговая марка | Производитель | Активное вещество | Совместимость с эндоскопами OLYMPUS |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| CIDEX | Johnson & Johnson | Глутаральдегид | Совместим |
| CIDEX OPA | Johnson & Johnson | Ортофталевый альдегид | Частичная совместимость* |
| NU-CIDEX | Johnson & Johnson | Надуксусная кислота | Совместим |
| SEKUSEPT Aktiv | Ecolab GmbH & Co. | Надуксусная кислота | Совместим |
| SEKUSEPT Plus | Ecolab GmbH & Co. | Глюкопротамин | Совместим (протестировано с минизондами OLYMPUS) |
| SEKUSEPT Pulver + Aktivator | Ecolab GmbH & Co. | Надуксусная кислота | Совместим |
| STERANIOS 2% | Anios | Глутаральдегид | Совместим |
| LISOFORMIN 3000 | Lizoform | Глутаральдегид | Совместим |
| GIGASEPT | Shulke&Mayr | Глутаральдегид + Формальдегид | Совместим |

*возможны внешние изменения (окрашивание трубок, обесцвечивание клеевых соединений)

Для использования в репроцессорах OER-A/OER-AW

| Торговая марка | Производитель | Активное вещество | Совместимость с эндоскопами OLYMPUS |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ACECIDE | Saraya | Надуксусная кислота | Совместим |
| CIDEX | Johnson & Johnson | Глутаральдегид | Совместим |

Обращаем Ваше внимание, что пользование несовместимым оборудованием может привести к травмам пациента или оператора и к повреждению и/или неисправности оборудования. Проверку и очистку оборудования необходимо выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в Инструкции по обработке аппаратов, включая выбор моющего и дезинфицирующего средства, в противном случае функционирование и работоспособность оборудования не гарантируется.

Благодарим за сотрудничество.

С уважением,

Чинарова В.В.

Консультант по продукту CDS

ООО «Олимпас Москва»

ООО «Олимпас Москва»

Электровзводская улица 27, стр.8, Москва, 107023
ИНН 7703026005 ОГРН 1027700273556
тел. + 7 495 926 70 77, e-mail: info@olympus-europa.com
<http://www.olympus.com.ru/>